

MC 100

Coagulómetro POCT para hematología



Analizador de coagulación portátil
formato POCT para hematología.
Diseño pequeño e intuitivo con múltiples
pruebas combinadas de reactivos
liofilizados que permiten un ahorro de
costes.

Perfecto para UCI, Urgencias hospitalarias,
maternidad y pediatría, así como para otros
departamentos de diagnóstico clínico.



Muestreo de sangre entera
Centrífuga interna
Baja interferencia

**Visualiza los resultados. La curva de reacción y los
resultados se muestran de forma intuitiva.**
**Pequeño y portátil. Coagulómetro fácil de llevar y
transportar, adecuado para múltiples escenarios.**
**Múltiples metodologías: método de coagulación
óptica, inmunoturbidimetría, ensayo de sustrato
cromóforo.**

Laboratorio

Solución económica
para análisis
inmediatos



Quirófanos

Respuesta a los
cambios fisiológicos
en tiempo real



Urgencias


Diagnóstico y
tratamiento precoz



UCI

Rápida reacción
frente al estado del
paciente

Pruebas	PT, APTT, FIB, TT, DD, AT, FDP, ACT, Anti-Xa, etc. sangre entera, plasma
Muestra	reactivos liofilizados
Tipo de reactivo	180µL
Tamaño de la muestra	12 minutos
Tiempo de prueba	Reconocimiento automático del código QR del disco reactivo
Código de identificación	Impresora térmica integrada o impresora externa (con controlador de impresora inalámbrica)
Impresora	Android 5 pulgadas (versión 5.1), resolución 720 × 1280, compatible con sistema LIS/HIS
Sistema operativo	270 mm * 180 mm * 155 mm
Tamaño	3kg
Peso	

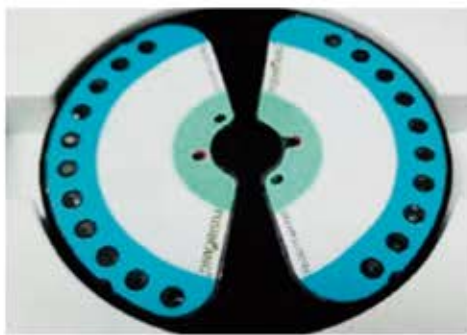

Paso 1
Inserte el disco en el coagulómetro POCT



Paso 2
Añada la muestra y diluya



Paso 3
Haga clic en "inicio"



Paso 4
Lectura de Resultados



Servicios y Equipamiento
de
Laboratorio y Hospital
satcliente@lrdiagnostico.com
Tel. 854 53 63 74
www.lrdiagnostico.com